

Technical Zoom

INDICE


| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione | 2 |
| Prestazioni e impostazioni | 3 |
| Optional | 5 |
| Scheda tecnica | 7 |

Sbarazzati della tensione con TENSOR

Stress? **Ansietà?** Stanchezza? **Cattiva circolazione?**
Dolori muscolari? **Ritenzione idrica?**

Osserva tutti i dettagli e le prestazioni di un lettino che permette combinare insieme sia massaggi rilassanti sia trattamenti per dolori moderati.

Scopri il lettino SPA **Tensor** all'interno.

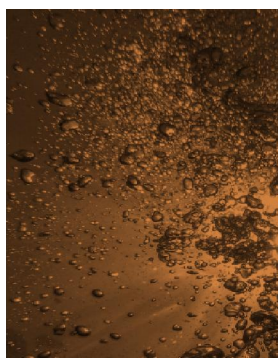

Descrizione

Il lettino Tensor è stato specialmente disegnato per effettuare trattamenti a corpo intero e si integra perfettamente in spazi Wellness e Spa. Dall'aspetto elegante e minimalista, il morbido materasso da un unico pezzo e 13 cm di spessore offre un gran comfort ai pazienti. I bordi smussati e il tatto del rivestimento trasmettono una sensazione di relax e benessere in qualsiasi ambiente.

Si tratta di un lettino a 3 sezioni fornito di 4 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale, del gambale e di tutto il materasso e grazie a ciò può adottare la posizione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg.



Le eleganti colonne di alluminio o laccate marroni conferiscono la massima stabilità al lettino.

La struttura che sorregge il materasso è tappezzata con lo stesso rivestimento, dandogli quel tocco in più di qualità.



Prestazioni

Mediante il telecomando di serie o la pedaliera (optional) è possibile regolare quasi tutti i movimenti del lettino.



L'ampio rango di altezza (da 68 cm a 89 cm) del lettino ne favorisce l'accesso al paziente.




L'inclinazione del gambale e dello schienale permette di svolgere un'ampia varietà di trattamenti in posizione supina.



La posizione Anti-Trendelenburg favorisce la scesa dei pazienti anziani e/o con mobilità ridotta dal lettino.



La posizione Trendelenburg si utilizza molto nei trattamenti di drenaggio linfatico per migliorare la circolazione sanguigna e ridurre la ritenzione idrica.

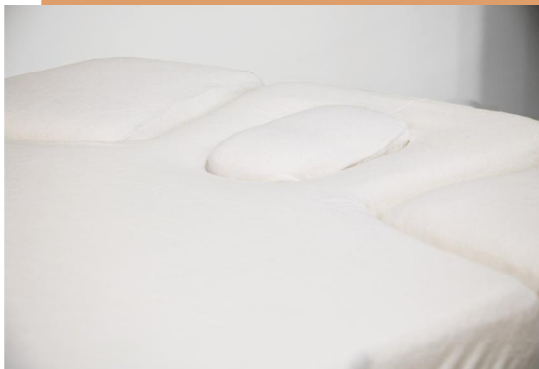


Il poggiatesta è dotato del foro facciale perché il paziente si senta totalmente comodo nei trattamenti in posizione prona.



Gli appoggia-braccia si regolano in altezza tramite un pistone a gas, oltre ad essere utili al professionista nei massaggi facciali.



Impostazioni

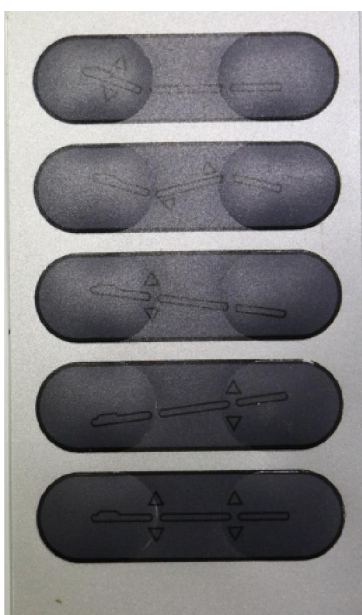

Premendo il tasto superiore si regola l'inclinazione dello **schienale**.

Premendo il secondo tasto si regola l'inclinazione del **gambale**.

Premendo il terzo tasto si regola l'inclinazione di tutto il lettino in posizione **Trendelenburg**.

Premendo il quarto tasto si regola l'inclinazione di tutto il lettino in posizione **Anti-Trendelenburg**.

Premendo il quinto tasto si regola l'**altezza** del lettino.

Optional

TELAIO MARRONE

È già disponibile con la referenza **Tensor BROWN BASE**, lettino dal rivestimento bianco e la base laccata marrone.



COPRILETTINO

Proteggi il tuo lettino con un coprilettino a 4 parti specialmente disegnato per il Tensor.



RUOTE DI GOMMA

Per spostare comodamente il lettino, Weelko offre delle ruote di gomma con freno che girano a 360°.



Completa il tuo spazio

I carrelli in legno bianco o marrone completeranno lo spazio insieme al tuo lettino Tensor.

EASY+ (Ref. 1019)



ASSIST (Ref. 1034)



HANDY (Ref. 1032)



VANTAGE (Ref. 1033)



Scheda tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Altezza | 68 / 89 cm |
| Larghezza | 76 cm |
| Lunghezza totale | 185 cm |
| Dimensioni della base | 121x54 cm |
| Spessore del materasso | 13 cm |
| Angolo d'impostazione schienale | 0°~+70° |
| Angolo d'impostazione gambale | 0°~-20° |
| Appoggia-braccia regolabili | Sì, in altezza (±10 cm) |
| Foro facciale | Sì |
| Capacità di carica | 200 kg |
| Rivestimento | PU |
| Numero di motori | 4 |
| Telecomando | Sì (di serie) |
| Ruote | optional |
| Referenza | 2249 / 2249 brown base |
| Tensione nominale | 220 V / 240 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento | 0,12 kWh |
| Peso netto | 104 kg |
| Peso lordo | 124 kg |
| Dimensioni imballo | 204x81x72 cm |
| Montaggio | Si consegna già montato |

